

COMO REALIZAR A COLHEITA

Urina



O teste deve ser realizado durante o período da manha entre Segunda, Terça, Quarta ou Quinta-feira e enviado no mesmo dia até às 13h



Preparar o material necessário para realizar o teste. Lavar as mãos com água e sabão e secar com uma toalha limpa.



Não realizar o teste a uma sexta-feira, fim de semana, feriado ou véspera de feriado, pois o mesmo poderá não ser aceite pelo laboratório para análise.

SUGESTÃO

Utilizar um recipiente higienizado maior para posteriormente recolher a urina para o tubo.

2 Ativar o teste

Antes de iniciar a colheita o kit deve ser ativado em www.labinthebox.pt.



O laboratório não poderá processar a amostra sem este registo.




Ver o vídeo de como realizar uma colheita antes de dar início ao teste. No vídeo são dadas algumas dicas para uma colheita de amostra bem-sucedida.



Preparação do teste

Depois de abrir a caixa do teu kit, retirar o tubo de dentro do saco de plástico. Dispor todos os elementos em cima da superfície.

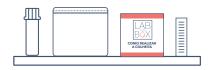

Deve ser colhida a primeira urina da manhã. Urinar no tubo que se encontra dentro do kit, desde o início da micção. Fechar e limpar o tubo.



dentificar o tubo com o código de barras

Colocar à volta do tubo, a etiqueta com código de barras fornecida no kit.



Colocar o tubo dentro do saco transparente.



Inserir o saco dentro da caixa do kit.



Colocar a caixa de cartão dentro do envelope de envio fornecido, que já contém uma etiqueta de envio pré-paga. Selar o envelope.



O envelope pode ser entregue num ponto de recolha até às 13h ou recolhido em sua casa sob agendamento que deverá ser efectuado até às 13h.

O envio deve ser feito no mesmo dia em que a colheita da amostra foi realizada.

Os resultados são enviados por email num prazo máximo entre 2 e 3 dias úteis. Em caso de dúvida, enviar um email para: help@labinthebox.pt

Para agendamento da recolha (+351) 218 860 169

(Chamada para a rede fixa nacional)



Consultar os pontos de recolha



CONTEÚDO DO KIT



Tubo de colheita de urina



Saco transparent



Envelope pré-pago]



[™] Guia Rápido Instrução de utilização



tiqueta

1x Etiqueta com aviso de volume de amostras